

MASCARILLA FULLPRINT HIGIÉNICA REUTILIZABLE/PINZA NASAL

CUMPLE CERTIFICACIÓN UNE0065:2020 – TEJIDO CERTIFICADO AITEX 2020TM1871-BFE $\geq 90\%$ 10 LAVADOS

CUMPLE NORMATIVA COMUNITY FACE COVERINGS UNE-CWA 17553:2020 BFE $\geq 70\%$ – 50 LAVADOS

Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso

COMPOSICION de la MASCARILLA: 1 CAPA DE 80% POLYESTER 20% POLIAMIDA

Ensayo Aitex numero 2020TM1871 – 01.06.2020

EFICACIA DE FILTRACION BACTERIANA BFE% PROMEDIO después de Personalizar /antes de los Lavados $93,50 \pm 1.16$

RESPIRABILIDAD PRESION DIFERENCIAL PA/CM2 27 ± 1

TRAS 10 CICLOS DE LAVADO BFE tejido estampado BFE 90,75%/Respirabilidad 27pa/cm2

Ensayo AMSLAB 20-005248

TRAS 30 CICLOS DE LAVADO BFE tejido estampado BFE 84,74%/Respirabilidad 10pa/cm2

TRAS 50 CICLOS DE LAVADO BFE tejido estampado BFE 79,90%/Respirabilidad 13pa/cm2

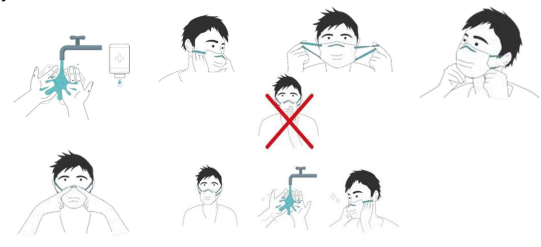
INSTRUCCIONES DE USO



Esta mascarilla no exime al usuario de la aplicación de las medidas de protección colectiva recomendadas por el Ministerio de Sanidad, distancia social e higiene de manos.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según las siguientes indicaciones. Esta mascarilla es de uso personal y reutilizable

"ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425";

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA	LAVADO Y SECADO MASCARILLA
- Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda, es decir sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y para algunas personas, piel afeitada. - Respetar los siguientes pasos 1-Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla. 2-Identificar la parte superior de la mascarilla 3-Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz 4- Sostener la mascarilla por el exterior y colocar el elástico en cada oreja 5- Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla 6-Verificar que cubre la barbilla 7-Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz 8-Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias 9-Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica 	1-Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente habitual, a una temperatura de lavado de 60° C) 2-Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias. 3-No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora. 4-Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas. 5-Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar. 6-Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste...), se debe desechar. Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual, véase la figura 2). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrar de la bolsa exterior. 
RETIRADA DE LA MASCARILLA Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos. 1-Quitarse los guantes de protección 2-Lavarse la manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica. 3-Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla 4-Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico que describe el apartado 10.1 5-Lavarse la manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica	Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva. Durante el mismo período de 4 h, la mascarilla solo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con las instrucciones, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones. 